

1

主剤容器を左手でわしづかみし、ジョイントキャップを親指と人差指でつまみます。

2

硬化剤容器のジャバラをジョイントキャップ側に2〜3山程縮めた状態中にある反応防止栓のグリップエンドを右手の親指と人差指でつまみます。

3

硬化剤容器を手前に約1/4回転させてゆるめます。
もとに戻します。

反応防止栓をつまんだまま、右手の硬化剤容器を手前に約1/4回転させてゆるめてから、再度もとに戻します。

4

左手を固定し、右手の反応防止栓のグリップエンドをつまんだまま右方向に完全に引き抜きます。

5

反応防止栓を図のように硬化剤の容器側で横にします。

6

硬化剤の底部が凹になるまで主剤容器にすべて押し出します。

7

主剤容器側にジョイントキャップを残し、硬化剤容器だけ外します。

8

空気を抜いてから混練棒の頭部をジョイントキャップに装着します。

9

混練棒を底部まで押し込み3〜4回繰り返して往復させた後に、底部の白い部分を親指で押し込んだまま両手で2〜3回もみます。さらに3〜4回混練棒を再度往復させます。容器を完全に伸ばし、色が均一になった事を確認します。
※強く押し込みすぎると、容器がやぶれる可能性があります。

10

容器のジャバラを整えてから、混練棒とジョイントキャップを外し、空気を抜いて注入ポンプのヘッドのネジ穴部分にセットします。